

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Hidratează, deproteinizează, dezinfectează, curăță, lubrificază, clătește, păstrează.

Indicații:

Pentru curățare, dezinfectare și înlăturarea zilnică a proteinelor, urmați pașii simpli de mai jos. Acest regim zilnic este recomandat de firma Bausch + Lomb pentru o purtare sănătoasă și confortabilă a lentilelor de contact.

Pasul 1: Puneți cel puțin 3 picături de soluție multifuncțională Biotrue pe fiecare din suprafețele lentilei și frecați ușor timp de 20 secunde pe fiecare parte.

Pasul 2: Clătiți în întregime fiecare parte a lentilei timp de 5 secunde cu soluție multifuncțională Biotrue.

Pasul 3: Puneți lentilele de contact curățate în recipientul pentru lentile și umpleți recipientul cu soluție proaspătă Biotrue. Lăsați lentilele în soluție cel puțin 4 ore. Amintiți-vă să folosiți mereu soluție proaspătă – nu refolosiți niciodată soluția.

Lentilele tale sunt acum gata pentru a fi purtate. Dacă totuși rămân impurități pe lentile, clătește-le cu soluție Biotrue înainte de aplicare.

Urmează întotdeauna instrucțiunile specialistului tău oftamolog. Bazându-se pe compoziția chimică a lacrimilor tale și pe programul de purtare a lentilelor, specialistul tău oftamolog îți poate recomanda produse sau proceduri suplimentare. Păstrează lentilele într-un recipient închis special conceput pentru acestea. Nu folosi niciodată soluție salină în locul soluției multifuncționale Biotrue. Soluția salină nu are rol dezinfectant.

Poți păstra lentilele într-un recipient închis, până când le vei folosi din nou, pe o perioadă de maximum 30 de zile. Dacă lași lentilele în recipient pe perioade mai lungi de timp, acestea trebuie curățate și dezinfectate înainte de a fi purtate, cu soluție proaspătă Biotrue, la interval de 30 de zile.

Conținut: soluție sterilă, izotonică, care conține hialuronat, sulfobetaină, poloxamină, acid boric, borat de sodiu, edetat disodic, clorură de sodiu și un sistem de dezinfectare dublă (poliaminopropil biguanidă 0.00013% și polyquaternium 0,0001%) cu rol conservant. Dacă sunteți alergic la vreun ingredient al acestui produs, opriți utilizarea.

Acțiuni: Atunci când este utilizată zilnic, soluția multifuncțională Biotrue™ curăță și înlătură depunerile de proteine și alte impurități de pe suprafața lentilelor de contact moi și previne apariția acestora. Soluția multifuncțională Biotrue™ distruge microorganismele dăunătoare de pe suprafața lentilelor. În timp ce lentilele stau în recipient, acoperite cu soluție Biotrue, ele sunt învăluite într-o peliculă hidratantă care asigură un confort susținut la purtare. Soluția Biotrue poate fi de asemenea folosită pentru clătirea lentilelor de contact.

Beneficiile soluției Biotrue: Inspirată de fiziologia ochilor tăi™. Soluția multifuncțională Biotrue conține un agent de lubrifiere ce se regăsește în mod natural în ochi, și are un pH echilibrat, similar lacrimilor.

Soluția Biotrue hidratează și lubrifică lentilele pentru o purtare confortabilă. Soluția multifuncțională Biotrue previne de naturarea anumitor proteine din filmul lacrimal pentru lentile mai curate și împiedică formarea depunerilor care pot cauza disconfort la purtare și pot scurta perioada de purtare. Prin menținerea lentilelor curate și lubrificate, soluția multifuncțională Biotrue asigură purtarea confortabilă a lentilelor de contact pe tot parcursul zilei. Biotrue. O soluție în armonie cu ochii tăi.

Indicații: Soluția multifuncțională Biotrue™ este indicată pentru dezinfecția chimică (nu la cald), igiena zilnică, înlăturarea zilnică a proteinelor, lubrifierea, spălarea și păstrarea tuturor lentilelor de contact moi, inclusiv cele din silicon-hidrogel, în conformitate cu recomandările specialistului oftalmolog.

Contraindicații: Dacă sunteți alergic (ă) la vreun ingredient al acestui produs, opriți utilizarea.

AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII: UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE A LENTILELOR DE CONTACT ȘI A SOLUȚIILOR DE ÎNTREȚINERE POATE DUCE LA INFECȚII OCULARE SEVERE ȘI PIERDEREA VEDERII. Este foarte important să respecti recomandările specialistului oftalmolog și instrucțiunile de utilizare ale produselor, inclusiv cele cu privire la recipientul pentru păstrarea lentilelor de contact. Infecțiile oculare se pot dezvolta foarte rapid și pot duce la pierderea vederii. Lentilele de port de zi nu sunt indicate să fie purtate atunci când dormi. Studiile clinice au arătat demonstrat creșterea riscului de reacții adverse severe la cei care poartă acest tip de lentile de contact atunci când dorm. Lentilele de port extins (zi și noapte) ar trebui în mod regulat să fie curățate și dezinfectate pe parcursul perioadei de purtare sau să se urmeze recomandările specialistului oftalmolog. Studiile clinice au demonstrat că există o incidență mai crescută a reacțiilor adverse severe în rândul celor care poartă lentile de contact în mod extins (zi și noapte)

comparativ cu cei care le poartă în regim de purtare zilnică. Studiile au arătat de asemenea faptul că fumatul se asociază cu o incidență mai crescută a evenimentelor nedorite la purtătorii de lentile de contact.

Dacă simți disconfort la purtare, ai ochii roșii, lăcrimezi sau vederea devine neclară, scoate lentilele de contact și ia imediat legătura cu un specialist oftalmolog.

Se recomandă ca purtătorii de lentile de contact să efectueze un examen oftalmologic de cel puțin 2 ori pe an, sau la recomandarea specialistului oftalmolog.

Nerespectarea recomandărilor cu privire la înlocuirea soluției din recipient sau folosirea apei de la robinet pentru curățarea lentilelor, pot duce la contaminarea lentilelor și a recipientului și la infecții oculare severe. Citește instrucțiunile de mai jos pentru informații suplimentare cu privire la siguranța utilizării.

Informații importante de siguranță:

- Respectați întotdeauna procedurile de întreținere a lentilelor. Nerespectarea acestora poate duce la apariția unor infecții grave la nivelul ochilor și la pierderea vederii.
- Vizitați-vă specialistul oftalmolog în mod regulat.
- Spălați-vă întotdeauna pe mâini înainte de a manevra lentilele.
- Nu folosiți apa de la robinet, apa îmbuteliată sau saliva pentru curățarea lentilelor sau a recipientului pentru lentile de contact.
- Folosiți numai soluție proaspătă pentru curățarea și dezinfectarea lentilelor de contact.
- Aruncați soluția din recipientul pentru lentile după fiecare utilizare.
- Soluțiile saline sau picăturile lubrifiante nu dezinfectează lentilele de contact.
- Respectați întotdeauna perioada recomandată de înlocuire pentru lentilele de contact, soluția și recipientul pentru lentile de contact.
- Nu atingeți capul flaconului de o suprafață sau de ochi deoarece aceasta poate contamina soluția sau poate cauza afecțiuni oculare. Puneți capacul flaconului după fiecare utilizare.
- Nu folosiți soluția împreună cu o metodă de dezinfectare la cald.

Avertismente și precauții:

- Aruncați soluția din recipientul pentru lentile de contact după fiecare utilizare.
- Puneți capacul flaconului după fiecare utilizare.
- Păstrați la temperatura camerei.
- Folosiți înainte de data expirării marcată pe ambalaj și pe flacon.
- Aruncați soluția rămasă după 90 zile de la deschidere.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Reacții adverse (Simptome și mod de acțiune): Probleme care pot apărea sunt: iritație oculară, senzație de arsură, înțepătură, senzație de corp străin în ochi, diminuarea confortului, lăcrimare excesivă, secreții oculare neobișnuite, înroșirea ochilor, reducerea vederii sau vedere fluctuantă, vedere încetșoșată, perceperea de halouri în jurul obiectelor, sensibilitate la lumină sau senzație de ochi uscat. Dacă apar, persistă sau se dezvoltă vreuna dintre simptomele de mai sus **Îndepărtați imediat lentilele de contact.**

- Dacă disconfortul sau simptomele dispar, priviți cu atenție lentila.
- Dacă lentila este deteriorată, nu o mai pune pe ochi și ia legătura imediat cu specialistul oftalmolog.
- Dacă lentila este murdară, prezintă impurități sau alte depuneri, dar nu este deteriorată, curăță, dezinfectează și clătește bine lentila și reaplic-o pe ochi.
- Dacă problemele persistă, scoate imediat lentila / lentilele și ia legătura cu specialistul oftalmolog.
- Dacă apar, persistă sau se dezvoltă vreuna dintre simptomele de mai sus, întrerupeți folosirea lentilelor de contact și consultați de urgență specialistul dumneavoastră oftalmolog.

Igiena optimă

- Spală-te întotdeauna pe mâini înainte de a manevra lentilele de contact
- Curăță, dezinfectează și clătește lentilele după fiecare utilizare
- Începe întotdeauna cu aceeași lentilă la aplicare / scoatere, pentru a nu le încurca (mai ales dacă ai dioptrii diferite)
- După folosire, aruncă soluția din recipient, clătește recipientul cu soluție Biotrue proaspătă și apoi lasă recipientul deschis, să se usuce la aer.

Mod de ambalare: Soluția multifuncțională Biotrue este disponibilă în flacoane sterile de 60ml, 120ml și 360 ml. Flacoanele și ambalajul de carton sunt inscripționate cu numărul lotului și data expirării.