

RO Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de utilizare cu atenție – conțin informații importante despre modul de utilizare a acestui produs. Pentru orice întrebări, vă rugăm să vă adresați specialistului dumneavoastră oftalmolog sau să ne contactați.

BAUSCH + LOMB

Biotrue[®] reVital

0.15% acid hialuronic, 0.5% polietilen glicol 8000 (PEG 8000) și nutrienți minerali.

Scopul utilizării: Lubrifiant oftalmic și reumidificator în timpul purtării lentilelor de contact.

Ce este Biotrue[®] reVital?

Biotrue[®] reVital este o soluție oftalmică clară, de culoare roz, ce conține 0.15% acid hialuronic, 0.5% polietilen glicol 8000 (PEG 8000), clorură de potasiu, clorură de calciu, clorură de magneziu, clorură de sodiu, vitamina B12, apă sterilă, acid boric și Oxyd[®] (un conservant bland care se descompune în apă, oxigen și sare, la contactul cu suprafața ochiului).

Valabil 2 luni de la desigilare.

Un produs ideal pentru calmarea și reducerea simptomelor persistente de ochi uscat, cauzate de deficitul lacrimal cronic.

La ce se folosește Biotrue[®] reVital?

Biotrue[®] reVital este un lubrifiant ocular potrivit pentru calmarea și reducerea simptomelor de ochi uscat.

Biotrue[®] reVital este compatibil cu toate tipurile de lentile de contact (moi și rigide), îmbunătățind considerabil purtarea acestora, pe tot parcursul zilei.

Când se folosește Biotrue[®] reVital?

Biotrue[®] reVital este conceput pentru a rămâne pe suprafața ochiului, asigurând hidratare îndelungată, prin susținerea filmului lacrimal natural cu ajutorul componentelor esențiale. Este un produs ideal pentru cei care acuză simptome de ochi uscat cum ar fi oboseala oculară, disconfort ocular, iritație, senzație de arsură, roșeață, durere, lăcrimare excesivă sau mâncărime.

Sindromul de ochi uscat poate fi cauzat de:

- factori externi, cum ar fi utilizarea îndelungată a computerului, de mediile interioare cu aer condiționat, fumul de țigară, mediul exterior însotit de vânt sau purtarea lentilelor de contact.
- alți factori, cum ar fi anumite medicamente (pastile contraceptive, beta-blocante, antispastice, diuretice) sau anumite afecțiuni care pot avea un aport semnificativ în apariția sindromului de ochi uscat.

Cât de des trebuie să folosiți Biotrue[®] reVital?

Puneți o picătură de **Biotrue[®] reVital** în ochi de 3 până la 5 ori pe zi, sau mai des dacă este necesar. Acest produs se poate folosi zilnic, de câte ori simțiți nevoie.

Cum se folosește Biotrue[®] reVital?

- Spălați-vă pe mâini înainte de a utiliza produsul. Scoateți capacul de protecție din vârful flaconului înainte de fiecare utilizare. Asigurați-vă că vârful flaconului nu atinge degetele.



- Înclinați ușor capul spre spate și trageți ușor pleoapa inferioară cu un deget al mâinii libere și țineți flaconul vertical deasupra ochiului, cu duza orientată în jos. Apoi strângeți cu grijă flaconul pentru a elibera o picătură.

Evități contactul vârfului flaconului cu ochiul sau degetele, pentru a preveni orice posibilă contaminare a soluției.



3.



Când NU ar trebui să folosiți Biotrue[®] reVital?

Nu utilizați acest produs dacă sunteți hipersensibili la unul dintre ingrediente.

Informații importante privind utilizarea Biotrue[®] reVital

- Foarte rar au fost raportate reacții locale de hipersensibilitate. Tratamentul ar trebui întrerupt în aceste situații.
- Nu atingeți suprafața ochiului cu vârful flaconului, pentru a preveni posibilele leziuni ale suprafetei oculare sau contaminarea soluției.
- Așteptați aproximativ 15 minute înainte de a utiliza altă soluție oftalmică.
- Nu folosiți Biotrue[®] reVital după data de expirare.
- Nu folosiți Biotrue[®] reVital dacă flaconul este deteriorat.
- Produsul este valabil 2 luni de la desigilare.

Cum se păstrează Biotrue[®] reVital?

A se păstra la o temperatură cuprinsă între +2 °C și +25 °C. Feriți produsul de lumină.

Producător

Dr. Gerhard Mann,
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165/173
13581 Berlin, Germania

Distribuitor: Visionaria SRL
Str. Decebal nr.81 Brașov -
500334, România
www.bausch.ro
contact@bausch.ro
Tel.:+40268423226

25°C Limita de temperatură



Nu utilizați dacă flaconul este deteriorat



Sterilizat prin tehnici de prelucrare aseptică



Aruncați produsul după 2 luni de la desigilare



Codul lotului



Data de expirare



Citiți instrucțiunile de utilizare



A se feri de lumina soarelui

Biotrue[®] reVital

^{®/™} sunt mărci comerciale ale Bausch & Lomb Incorporated sau ale afiliilor săi.
© Bausch & Lomb Incorporated

0483

47119PB781/1-GR+
P1GRBGRO01